

GUÍA DE INSTALACIÓN WBPBM03

- Lea atentamente todas las precauciones e instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
- Se puede aplicar una tarifa de servicio por cualquier daño causado por mal uso o error del operador.



Evita llamas abiertas, estufas y lugares húmedos



Instalar en un área con buena ventilación



Mantén la temperatura alrededor de 24-25°C y la humedad alrededor del 40% donde está instalada la cámara PBM de cuerpo completo



SÓLO para esterilizar el dispositivo. NUNCA lo use cuando una persona esté dentro o cerca del dispositivo

Precauciones de seguridad

Este dispositivo irradia longitudes de onda específicas de luz visible e infrarroja cercana.

Consulte a su médico si es sensible a la luz. Además, si está tomando algún medicamento, consulte con su médico para ver si su medicamento es "fotosensible".



Lávese la cara y el cuerpo antes de usar.

Retire todos los cosméticos, protectores solares y lociones corporales que bloqueen la transmisión y absorción de la luz.




Parte Trasera

Dimensión (mm):
2200(L) x 1060(H) x 900(W)

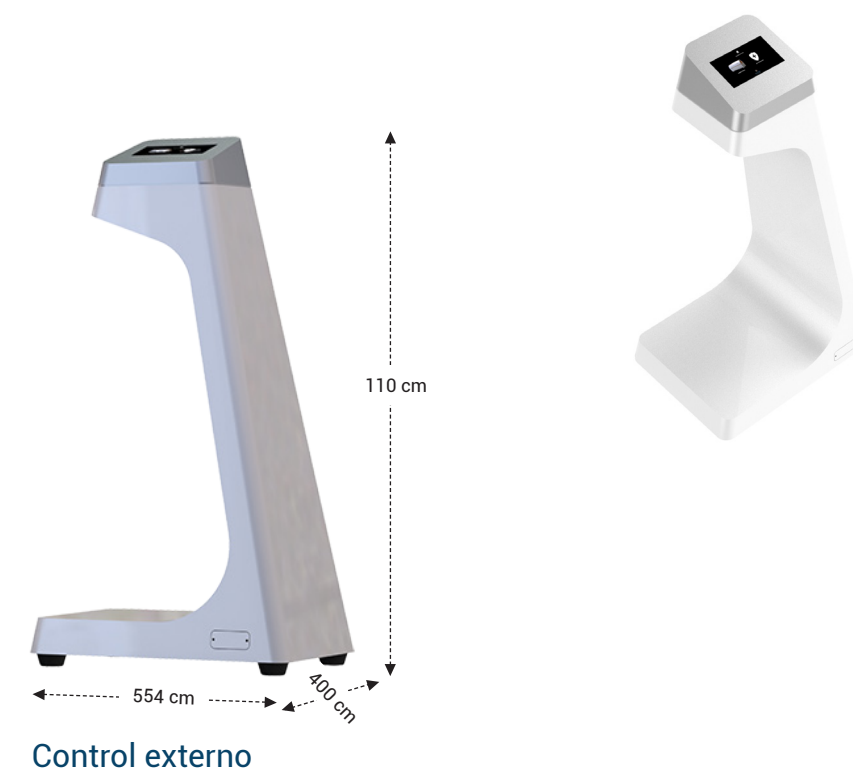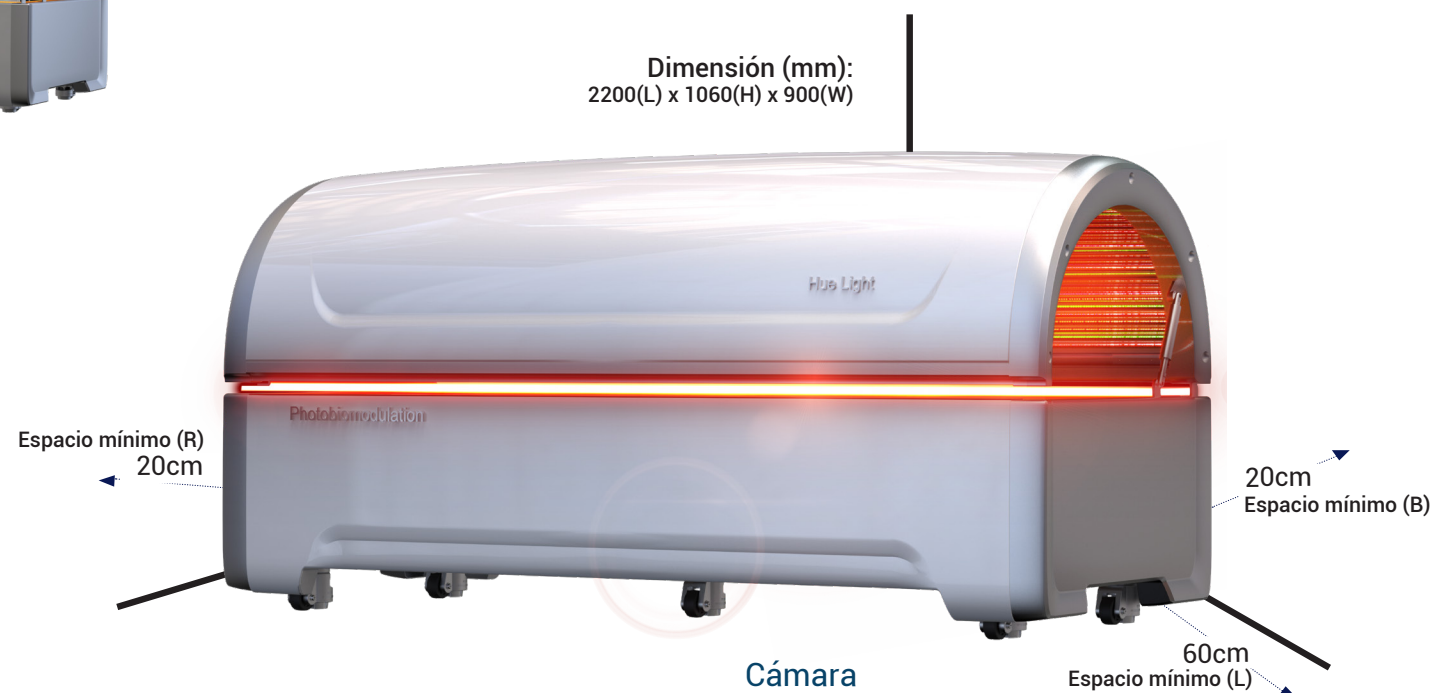

Conectando la energía

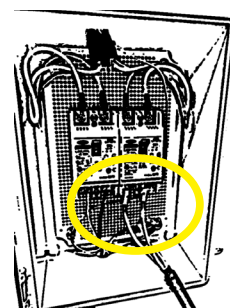


Chamber: AC
110~240V/
50Hz~60Hz / 3.8 kw

1. Conecte el cable de alimentación de la cámara directamente a la caja de distribución del disyuntor de tierra como se ve en la imagen (izquierda). Debe ser de al menos 50 A (4,5 Kw) para un uso seguro.
2. Conecte el cable de alimentación del dispositivo de control externo a la cámara (consulte la imagen de la derecha).



Parte trasera del controlador

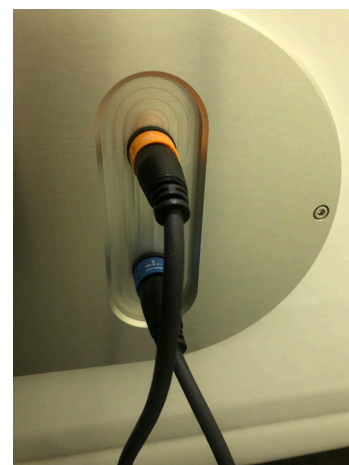

Parte trasera de la cámara

Conectando los Cables

1. Conecte los cables adecuados como se muestra (a la derecha).
 2. Asegúrese de bloquearlos correctamente como se recomienda.
- * Precaución: Si los cables no están correctamente enchufados y bloqueados en su lugar, pueden quemarse y derretirse.



Fijando la cámara en su lugar

Después de colocar la cámara en el lugar designado, gire la rueda roja para bajar la almohadilla de goma hasta que toque el suelo.



Limpeza y Mantenimiento Regular

Limpeza después de uso

- * Limpie y desinfecte el interior (superficie de policarbonato) y exterior de la cámara. Utilice un limpiador desinfectante con alcohol. No utilice detergentes que puedan dañar la superficie del interior.
- * Use alcohol para desinfectar y limpie con un trapo de microfibra limpio.

Limpeza diaria


- * Los extractores envían aire fuera de la cámara, lo que puede provocar que se acumule suciedad con el tiempo. Si se acumula polvo, se debe limpiar el extractor de aire. Limpiar con un trapo suave humedecido con agua.
- * Inspección del equipo: Para garantizar un funcionamiento seguro, revise el dispositivo cada 300 horas de uso.
- * Pruebe el dispositivo para asegurarse de que todas las funciones funcionan correctamente.
- * Inspeccionar la fuerza de apertura y cierre de la cubierta superior.
- * Inspeccione todos los cables y conexiones de alimentación, acrílicos y cables de alimentación.
- * Revisar el interior. El policarbonato transparente fuera de posición, roto o muy rayado debe sustituirse inmediatamente.




Controlador de Smartphone y Tablet/PC/App disponible

Control y función de la aplicación

Descargue la aplicación de Hue Light PBM Chamber

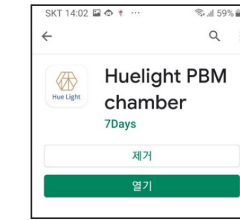

Descarga en Google Play (Solo Android)

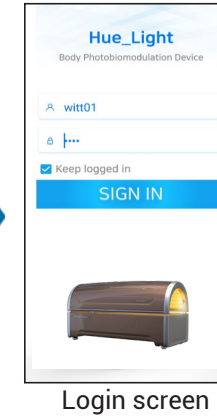

2. Encendido
Presione el botón de encendido para encender la cámara.

3. Configuración de tiempo +
Presione el botón time+ para aumentar el tiempo en 1 minuto.



1. Bluetooth
Presione el botón de Bluetooth por 2-3 segundos para conectarse al Bluetooth.
2. Encendido
Presione el botón de encendido para encender la cámara.
3. Configuración de tiempo +
Presione el botón time+ para aumentar el tiempo en 1 minuto.
4. Configuración de frecuencia
Configure la frecuencia presionando el botón.
5. Inicio
Presione el botón de inicio para comenzar la cámara.

Problemas Comunes: Q&A

Síntoma	Problemas para confirmar	Medidas
Cuando la fuente de luz LED no se enciende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique la conexión eléctrica 2. Verifique el estado de contaminación del LED 3. Verifique si hay bajo voltaje 4. Verifique la duración de la lámpara LED 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique la potencia de cada fuente de luz abriendo la caja en los extremos de la cámara. 2. Compruebe si ha entrado agua o contaminantes en el módulo LED y asíprelo periódicamente para mantenerlo libre de residuos. 3. Verifique el voltaje de suministro 220V 4. Compruebe si el tiempo de la lámpara supera las 25.000 horas.
El módulo de lámpara LED no se enciende y la pantalla del temporizador está en blanco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado. 2. Verifique que las conexiones LED estén conectadas correctamente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una fuente de alimentación. 2. Verifique el tablero de distribución de energía AC. Restablezca el disyuntor o reemplace el fusible
Cada módulo de luz LED está demasiado caliente. Más de 70 grados	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Hay suficiente flujo de aire? 2. Temperatura del espacio del lugar de instalación. 3. ¿La función de escape es débil porque el ventilador de escape está sucio? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpiar y revisar el extractor de aire. 2. Asegúrese siempre de que la temperatura del lugar de instalación esté alrededor de los 25° C.

Frecuencias Dr. Nogier		
Frecuencia A 292Hz <i>Vitalidad Celular</i> Ayuda a la curación de heridas, la reparación de la piel y los nervios, y reduce las cicatrices, la inflamación y los tumores.	Frecuencia B 584 Hz <i>Equilibrio nervioso autónomo</i> Mejora la asimilación nutricional, problemas de alergias y equilibra el sistema nervioso parasimpático.	Frecuencia C 1,168Hz <i>Circulación muscular y sanguínea</i> Se utiliza para el dolor muscular, esquelético y miofascial, los testículos, el bazo y la corteza de la glándula suprarrenal.
Frecuencia D 2,336 Hz <i>Descanso para la mente y el cuerpo</i> Ayuda a equilibrar los dos lados del cerebro. También puede ayudar a reducir y tratar el estrés.	Frecuencia E 4,672Hz <i>Sistema nervioso periférico.</i> Se utiliza para trastornos de la columna y piel y para controlar el dolor. Resuena con la médula espinal y el sistema nervioso periférico.	Frecuencia F 73Hz <i>Balance Hormonal</i> Ayuda con espasmos musculares, dolores faciales, dolores de cabeza y depresión. Se ha utilizado para fracturas óseas que no cicatrizan y para ayudar a equilibrar las hormonas.
Frecuencia G 146Hz <i>Activación Cerebral</i> Utilizado para la memoria, trastornos psicológicos, nerviosismo y preocupaciones. Resuena con la corteza cerebral del cerebro, involucrada con el pensamiento, la imaginación y la creación.	Ciclo de Frecuencia Ciclo continuo desde la frecuencia A – G	Normal Nivel de potencia más alto

Responsabilidad del producto

El fabricante o distribuidor no es responsable de ningún problema causado por modificaciones o alteraciones no autorizadas del equipo.

Debe utilizar el equipo únicamente para el propósito previsto. Si lo utiliza para cualquier fin distinto al establecido, asume toda la responsabilidad. El fabricante/vendedor no es responsable.

- ☐ Respetar las condiciones de operación, mantenimiento y servicio fijadas por el fabricante. Los trabajos de mantenimiento y reparación sólo pueden ser realizados por una persona autorizada por el fabricante o una empresa de servicios autorizada o un representante de ventas de equipos.
- ☐ Para cuestiones eléctricas y de seguridad, siga las reglas de seguridad generalmente aceptadas para aparatos eléctricos.
- ☐ Medidas de seguridad: Si hay algún problema o el equipo no está en uso, desconecte completamente la toma de corriente de eléctrica.

Garantía A/S

■ Si hay algún problema con este producto, puede calificar para 1 año de servicio A/S gratuito. (Se puede aplicar una tarifa de servicio). Para obtener la garantía A/S, debe proporcionar el comprobante de compra (mostrar la fecha de compra en el manual)

■ Servicio pagado

- Fallo o daño del producto debido al mal uso del usuario.
- Fallo debido a reparación o modificación inadecuada
- Fallo causado por desastre natural.
- Daños causados por el incumplimiento de las precauciones especificadas en este manual.